

Informacja dla pacjenta na
temat leczenia chorób przyzębia

Straumann®
Emdogain®

Ponad 2 miliony
leczonych pacjentów

Zachowaj zęby
na więcej niż 20 lat z
Straumann® Emdogain®

Co wiesz na temat choroby dziąseł i przyzębia?

Choroby dziąseł i przyzębia dotyczą większości populacji ludzi dorosłych i stanowią najczęstszą przyczynę utraty zębów.

CZY JESTEŚ W GRUPIE RYZYKA?

- Czy Twoje **dziąsła krwawią** podczas szczotkowania zębów lub używania nici dentystycznej?
- Czy masz problem z **nieprzyjemnym oddechem**?
- Czy Twoje dziąsła są **zaczerwienione lub obrzęknięte**?
- Czy w Twojej rodzinie ktoś szybko utracił zęby?
- Czy **palisz**?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z powyższych pytań, możesz znajdować się w grupie osób narażonych na wystąpienie chorób przyzębia.

Nieleczona choroba przyzębia prowadzi do utraty zębów i zwiększa ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, jak zawał serca czy udar mózgu.


Choroby przyzębia: ukryte zagrożenie dla Twojego zdrowia

Choroby dziąseł i przyzębia to „ukryte” zagrożenie dla Twojego zdrowia. Dlaczego?

Nawet wówczas, gdy Twoje zęby wyglądają zdrowo i nie bolą choroba może rozwijać się w tkankach podtrzymujących zęby i atakować kość szczęki oraz więzadło przyzębia (wieszadło znajdujące się pomiędzy zębem i kością, utrzymujące ząb w kości).

Chorobę poprzedza stan zapalny. Nazywamy go zapaleniem dziąsła i jest on procesem odwracalnym.

Dalsze rozprzestrzenianie się procesu zapalnego prowadzi do niszczenia tkanek podtrzymujących zęby (rys. B), ich ruchomości, a w końcu utraty. Proces ten jest nieodwracalny jeśli nie zostanie podjęte leczenie.

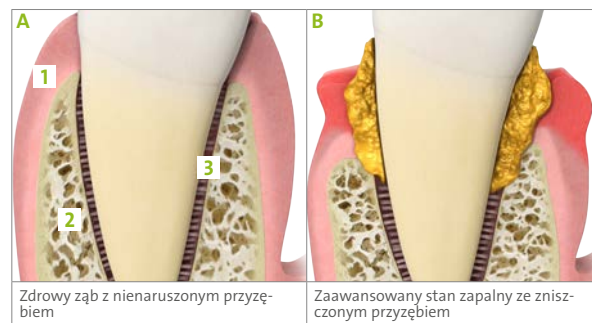

1 = dziąsło 2 = kość 3 = więzadło przyzębia

Choroba przyzębia często przebiega bez widocznych symptomów. Ból, ruchomość zębów i ich przemieszczanie się, pojawiają się często w już zaawansowanym stadium choroby. Krwawienie z dziąseł jest najwcześniejszym sygnałem choroby.

W jaki sposób można leczyć choroby przyzębia?



Konieczne jest podjęcie specjalistycznego leczenia.

LECZENIE WSTĘPNE

Pierwszym krokiem jest profesjonalne oczyszczenie zębów z bakterii (płytki bakteryjnej) powodujących chorobę. Po dokładnym instruktażu poprawnego czyszczenia zębów, włącznie z obszarami trudno dostępnymi, jak przestrzenie międzyzębowe, pacjent kontuuje kontrolę płytki w domu.



Usunięcie płytki nazębnej i kamienia.

TERAPIA REGENERACYJNA

Terapia regeneracyjna jest wskazana w przypadku, gdy choroba przyzębia spowodowała głębokie zniszczenie kości podtrzymującej zęby.

Procedura

Preparat Straumann® Emdogain® jest aplikowany na odsłoniętą, oczyszczoną powierzchnię korzenia zęba podczas drobnego zabiegu chirurgicznego.



Emdogain® zostaje naniesiony na ubytek; żelowa konsystencja preparatu pozwala na równomierną aplikację.

Konieczna jest współpraca

Sukces leczenia periodontologicznego zależy także od współpracy pacjenta z lekarzem. Codzienna higiena jamy ustnej w połączeniu z profesjonalnymi zabiegami pielęgnacyjnymi, zaleconymi przez Twojego stomatologa, zwiększają szansę na zachowanie naturalnych zębów.

Straumann® Emdogain®:

Czym jest i jak działa?

Biorąc pod uwagę ponad 800 badań naukowych oraz ponad 2 miliony leczonych pacjentów, Emdogain jest jednym z najlepiej udokumentowanych oraz sprawdzonych produktów w stomatologii.

Naśladując naturę

Straumann® Emdogain® jest żelem, zawierającym naturalne białka. Imituje biologiczny proces embrionalnego rozwoju zęba, wspierając regenerację wszystkich tkanek przyzębia. Odbudowa struktur podtrzymujących zapewnia silne zakotwiczenie dla Twoich zębów.

Rezultaty długoterminowe

Straumann® Emdogain® nie jest rozwiązaniem powierzchownym i krótkoterminowym. Trwale regeneruje utracone tkanki, co pozwala zachować naturalne zęby na długi czas.

Ubytek kości spowodowany chorobą przyzębia*



Wstępna diagnoza
Choroba dziąseł spowodowała wyraźny ubytek kości.



Rok po leczeniu preparatem Straumann® Emdogain®
Struktury podtrzymujące zęby zostały zregenerowane.

W skrócie

- Choroby przyzębia stanowią najczęstszą przyczynę utraty zębów wśród dorosłych.
- Emdogain® pozwala zachować zęby objęte chorobą przyzębia.
- Zastosowanie Emdogain® może skutkować zmniejszeniem bólu i obrzęku** pozabiegowego oraz wspiera przyspieszenie procesu gojenia.

* Dr Gunnar Heden, Szwecja

** W porównaniu z tradycyjnym leczeniem

INSTRUKCJE PO ZABIEGU:

1–3 tydzień


- Płucz usta płynem antyseptycznym kilka razy dziennie
- Nie szczotkuj obszaru operowanego
- Nie czyść przestrzeni międzyzębowych w okolicy operowanego obszaru
- Unikaj alkoholu, papierosów, kawy, czarnej herbaty oraz świeżych produktów mlecznych
- Unikaj gryzienia leczonym obszarem
- Unikaj pokarmów twardych i ciągnących się
- Szwy zostaną usunięte po 2-3 tygodniach

4–6 tydzień

- Kontynuuj płukanie ust płynem antyseptycznym kilka razy dziennie
- Nie czyść przestrzeni międzyzębowych w okolicy operowanego obszaru
- Zgłoś się na profesjonalne oczyszczanie zębów w gabinecie stomatologicznym

Od 7 tygodnia

- Ostrożnie szczotkuj zęby w okolicy operowanego obszaru wyłącznie z czyszczeniem przestrzeni międzyzębowych
- Pamiętaj o regularnych wizytach kontrolnych oraz profesjonalnych zabiegach oczyszczania zębów w gabinecie stomatologicznym

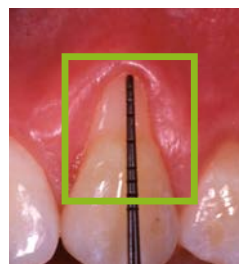

Przed leczeniem
5 mm recesja dziąsła



8 miesięcy po leczeniu Emdogain®
Całkowite pokrycie defektu

Zdjęcia dzięki uprzejmości prof. G. Zucchelli, Bolonia (Włochy)

Procedura postępowania w pierwszych tygodniach po zabiegu może różnić się w zależności od każdego przypadku. Pacjent powinien zostać poinformowany przez lekarza jak postępować w tym okresie oraz ściśle stosować się do wskazówek.

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


ŚWIATOWY LIDER, ŚWIATOWE ZAUFANIE

Nieważne w jakim miejscu na świecie się znajdziesz - lekarze pracujący produktami Straumann zawsze będą w pobliżu.

Założona w 1954 roku z siedzibą w Bazylei w Szwajcarii, firma Straumann jest pionierem i światowym liderem w implantologii stomatologicznej oraz regeneracji tkanek jamy ustnej. We współpracy z wiodącymi klinikami, ośrodkami badań oraz uniwersytetami, Straumann prowadzi badania naukowe, udoskonala oraz produkuje implanty stomatologiczne, instrumenty, komponenty protetyczne i biomateriały, wykorzystywane w procedurach zachowania/zastąpienia oraz odbudowy zębów.

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA ORAZ SATYSFAKCJA PACJENTÓW



Pieczętka lekarza