

Nawigacja Komputerowa

Instrukcja instalacji oprogramowania coDiagnostiX™


Wykonaj następujące kroki, aby zainstalować **PEŁNĄ wersję** coDiagnostiX™ na swoim komputerze:

- 1 Pobierz program coDiagnostiX™ (pełna wersja oprogramowania) z autoryzowanej strony producenta lub zainstaluj z dołączonego nośnika na płycie pendrive.

PEŁNA WERSJA bezpośredni link znajduje się tutaj:


<https://www.codiagnostics.com/files/coDiagnostiX-100300-226-FULL-2020-12-04.zip>

- Aby rozpakować cały folder wybierz program do rozpakowywania plików ZIP i wyodrębnij pliki postępując zgodnie z instrukcjami.

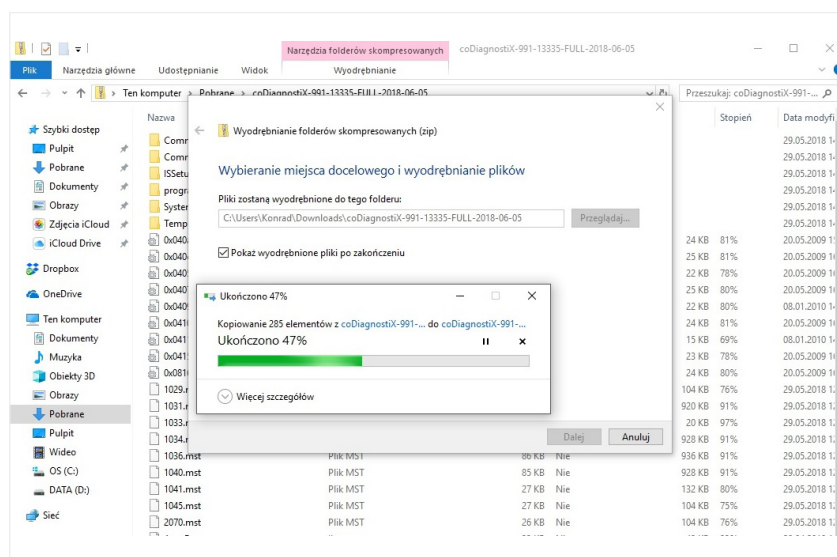

- 2 - Uruchom plik instalacyjny „coDiagnostiX.msi” z folderu pobierania, klikając dwukrotnie w ikonę.

- Uruchom plik instalacyjny „setup.exe” z folderu coDiagnostiXFULL, klikając dwukrotnie w ikonę.

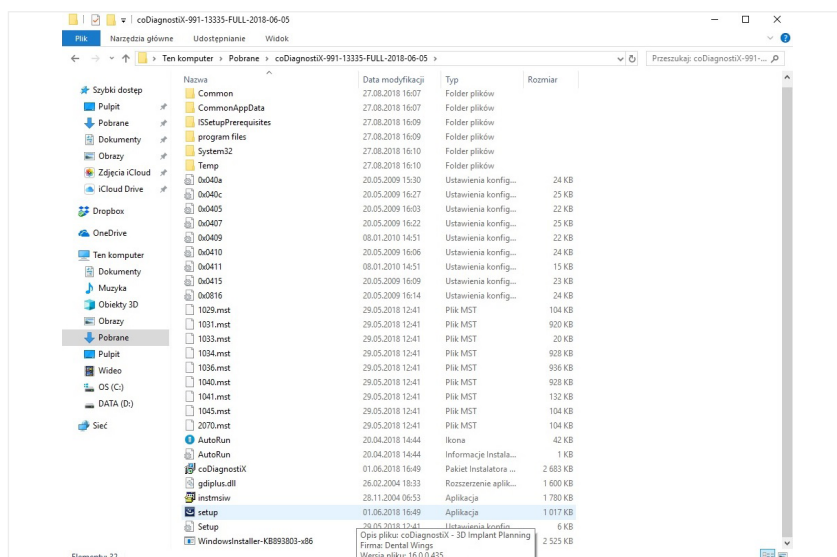

- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze instalacji.

- 4 Po instalacji znajdziesz skrót do coDiagnostiX™ na pulpicie i menu startowym.

5

Aby uruchomić program należy w pierwszej kolejności przestać maila w celu jego aktywacji na adres.:
konrad.zajac@schmidt-dental.pl lub
piotr.fulek@schmidt-dental.pl
 (czynność ta jest niezbędna w celu prawidłowego funkcjonowania oprogramowania coDiagnostiX™)

Tytuł maila:

Aktywacja nowej licencji oprogramowania coDiagnostiX™ (proszę o podanie numeru licencji/klucza oraz nazwy kliniki)

Treść maila:

Dane użytkownika.: (nazwa kliniki lub laboratorium)


Nip.: (adres kliniki lub laboratorium)

Numer kontaktowy.: (numer kontaktowy do użytkownika)

Email: (mail kontaktowy do użytkownika)

Numer seryjny: (numer klucza): (9 cyfrowy unikalny numer licencji – numer powinien znajdować się na białym pendrive (dongle) lub opakowaniu dostarczonym przez producenta)

Wersja licencji.: (dokładny opis wersji powinien znajdować się na opakowaniu dostarczonym przez producenta lub w protokole zamówienia np.: wersja Client)

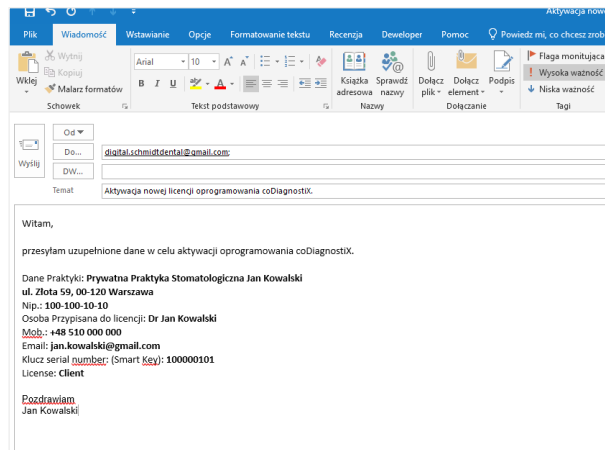

6

Po procesie przetwarzania aktywacji licencji u producenta program jest gotowy do pracy (producent przewiduje czas aktywacji do 24 godzin).

- Aby program uruchomił się poprawnie w pierwszej kolejności należy umieścić w wolnym porcie USB dołączony do zestawu klucz sprzętowy (dongle z unikalnym kluczem aktywacyjnym) i poczekać na jego zaimplementowanie do systemu.



Prawidłowo działający klucz sprzętowy (niebieska migająca dioda LED)

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

digital@schmidt-dental.pl

konrad.zajac@schmidt-dental.pl

mob.: +48 518 753 900

piotr.fulek@schmidt-dental.pl

mob.: +48 514 608 529

TeamViewer – oprogramowanie narzędziowe przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu operacyjnego poprzez Internet.

Usługi po instalacji oprogramowania coDiagnostiX takie jak: wsparcie techniczne, pomoc i aktualizacja świadczymy telefonicznie przy jednoczesnym użyciu zdalnego wsparcia.

Za pomocą programu TeamViewer możemy w przeciągu kilku sekund nawiązać połączenie internetowe z dowolnym komputerem osobistym lub serwerem klienta i zdalnie nim sterować.

PEŁNA WERSJA bezpośredni link znajduje się tutaj: <https://www.teamviewer.com/pl/download/windows/>

W celu poprawnej pracy oprogramowania coDiagnostiX proszę sprawdzić wymagania techniczne i specyfikacje urządzenia.

Wymagania techniczne bezpośredni link znajduje się tutaj: <https://www.codiaagnostix.com/support.php#specs>